


## Wie können Sie Daten aus einer alten BodyComposition-Version in die Software BodyComposition V9.0M einspielen?



### Schritt 1: Am „alten“ PC eine Datensicherung (Backup) durchführen:

1. Software BodyComposition öffnen
2. „DATEI – SICHERUNG ERSTELLEN“ wählen

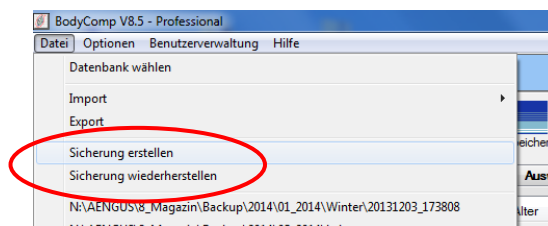


3. Pfad suchen (z.B auf einen USB-Stick) → dorthin wird das Backup dann gespeichert.

Voreingestellt ist der Backupordner auf „Laufwerk C – Medical - Bodycomp V8.5/V9.0 – Backup“!

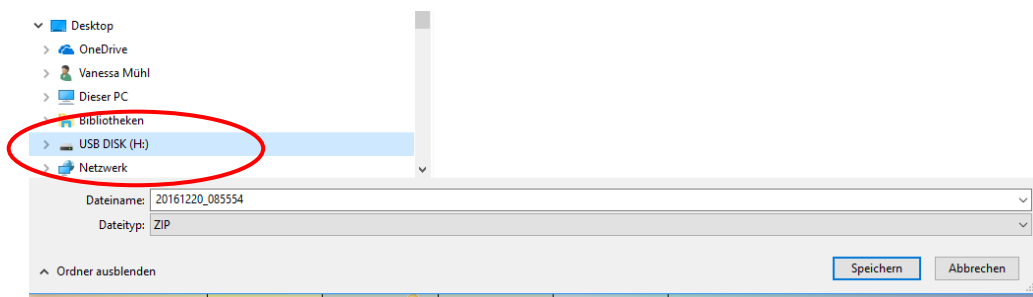
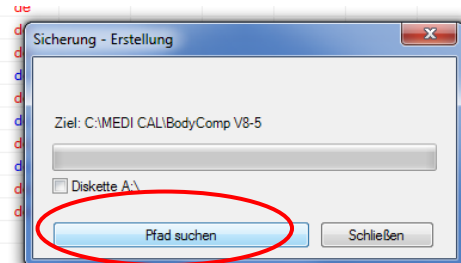


4. Es wird eine zip-Datei erstellt.

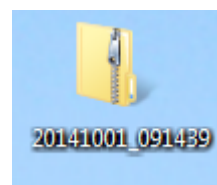

## Schritt 2: Am „neuen“ PC die Daten importieren

1. Am „neuen“ PC die BodyComposition V9.0 installieren und öffnen  
(Download von: <https://www.aengus.at/koerperanalyse/bodycomposition-update/>)
2. Den USB-Stick mit dem Backup am PC anstecken
3. In der Software „DATEI – Import – Bodycomposition V8/V9“ wählen
4. Pfad suchen (hier den Pfad zum **USB-Stick** wählen, wo die **zip-Datei** gespeichert wurde)  
Hinweis: bei Dateityp „**BodyComposition – Backup (\*.zip)**“ wählen

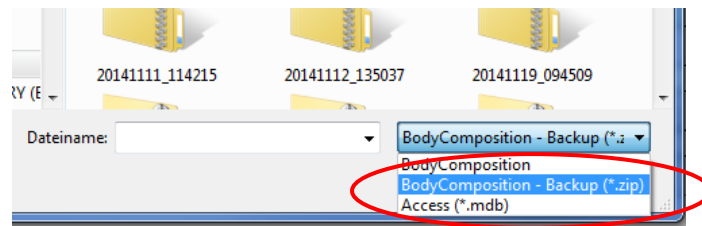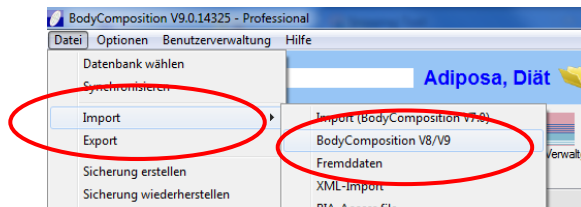

5. Import starten. Fertig!

