

Messausdrucke als PDF speichern

1. Messergebnis in der Vorschau öffnen

2. auf "Drucken" klicken



3. Druckersetup öffnen

4 10/				I ANP
🍓 Drucker				×
۵	Auswahl der Druckei	nstellungen		
Drucker	DICOLL MD	04500.00		
Drucker	RICOH MP	C4003 P5		
Papier				
			ОК	Abbrechen
_				, in the second se

4. Drucker "Free PDF" auswählen und OK klicken

		aktuelle iv	ucken		X
Drucken			Drucker		
Drucker			Name:	FreePDF	Figenechaften
Name:	RICOH MP C4503 PS	 Eigenschaft 	Nume.		- Eigenschalten
Status: Tvp:	Fax FreePDF Cestetner MP 201 PCL 6		Status: Typ:	Bereit MS Publisher Color Printer	
Standort: Kommentar:	Gestetner MP C305 PCL 6 Gestetner MP C4503 PCL 6 Microsoft Print to PDF Microsoft XPS Document Writ	ter Ausgabe in	Standort: Kommentar:	FreePDFXP1:	Ausgabe in Datei
	RICOH Aficio MP 301 RICOH Aficio MP C305 RICOH MP C4503		 Druckbereich Alles 	1	Exemplare Anzahl Exemplare: 1
Seiten	RICOH MP C4503 PS Send To OneNote 2013	112233 So	O Seiten	von: bis: bis:	1 2 3 Sortieren
	-	OK Abb			OK Abbrechen



5. FREE PDF Creator öffnet sich – "Save as ... " anklicken

Free FreePDF 4.08			_					
		<u>E</u>	dit Configuration					
Please choose:								
PDF Profile								
High Quality								
PDF File Name								
Messprotokoll für Adipositas, Diet								
✓ View new PDF File	View new PDF File 🗾 Lo			ck PDF with Password				
Send by Mail	Save <u>A</u> s	Send to <u>D</u> esktop	Add to g	next PDF				

6. Speicherort auswählen, z.B. Desktop, und SPEICHERN klicken

